

BIJSLUITER OLSON MASK & DIY-PAKKET

Google: 'Olson Mask instruction video'.

DIY-pakket

- Was vóór het knippen van het mondmasker de stof eerst op 60 graden in de wasmachine. De stof krimpt tijdens het wassen.
- Neusbeugel gemaakt van groen binddraad met kunststof coating waarin een fijne ijzerdraad zit. [Binddraad Ø 2,5 mm. voor het tijdelijk aanbinden van planten als voor het toebinden van bijvoorbeeld afvalzakken, ACTION/tuinschap] (Neusbeugel niet strijken!)

Oor-elastiekjes

Haar-elastiekjes [ACTION/haarproducten]

Filtertips

DIY Barrier Mask/Filter materiaal (ACTION) of filter gemaakt van katoen, vilt, koffiefilter, dubbelgevouwen stukje keukenrol, tissue of een gele Sorbodoek. (Let op: Hiervoor is geen wetenschappelijk bewijs. Gebruik op eigen risico.)

*Stofzuigerfilter wordt afgeraden door het RIVM (Zie RIVM.nl).

Wastips

De Olson Mask en de losse filter (met uitzondering van papieren filter) na gebruik wassen in de wasmachine op 60 graden op een volledig wasprogramma, zonder wasverzachter, in een wasnetje. Mondmasker strijken om extra te desinfecteren (met uitzondering van neusbeugel met kunststof coating).

Dragen van het mondmasker

Raak het mondmasker niet aan, behalve aan de hengsels tijdens het opzetten. Handen wassen 20 sec. en houd 1,5 meter afstand. Mondmasker om de 4 uur verwisselen, dus zorg voor een voorraad mondmaskers voor onderweg (incl. plastic zakjes of bakjes).